

Direkte Immunfluoreszenz Untersuchung (DIF)

- Informationen

Entnahmestelle:

- Ort der Biopsie sollte periläsional bei Verdacht auf autoimmunbullöse Erkrankungen und läsional bei Vaskulitis und Lupus erythematodes sein.
- Bitte 2 Biopsien entnehmen (oder grössere Biopsie halbieren): eine Probe für konventionelle Histologie (Formalin) und eine Probe für DIF.

Versand:

- DIF Probe in Michel'schen Transportmedium mittels normaler Post versenden
- Eine DIF-Untersuchung aus in Formalin-fixierten Gewebe ist nicht möglich!
- Bitte DIF-Untersuchung auf dem Einsendeformular vermerken

Lagerung Michel'sches Transportmedium:

Bitte bis zum Gebrauch im Kühlschrank bei 4-7°C aufbewahren.

Bestellung der Lösung via Internetseite. (Pathologie Luzerner Kantonsspital → Informationen für Auftraggeber → Bestellung Versandmaterial → DIF Dermatologie)

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an das Histologielabor des Luzerner Kantonsspital wenden: Tel: 041 205 34 81 oder pathologie@luks.ch

Vielen Dank für Ihre Bestellung.